

Récapitulatif



Inserts	Modes maximum préconisés				Réglage Fin*	Irrigation ml/min
BS1S	D1	D2	D3	D4		60
BS1L	D1	D2	D3	D4		60
BS2L	D1	D2	D3	D4		60
BS2R	D1	D2	D3	D4		60
BS4	D1	D2	D3	D4		60
BS5	D1	D2	D3	D4		60
BS6	D1	D2	D3	D4		60
SL1	D1	D2	D3	D4		60
SL2	D1	D2	D3	D4		60
SL3	D1	D2	D3	D4		50
SL4	D1	D2	D3	D4		30
SL5	D1	D2	D3	D4		30
TKW1	D1	D2	D3	D4		100
TKW2	D1	D2	D3	D4		100
TKW3	D1	D2	D3	D4		100
TKW4	D1	D2	D3	D4		100

* Non applicable sur PIEZOTOME SOLO (LED).

Récapitulatif



Inserts	Modes maximum préconisés	Réglage Fin*	Irrigation ml/min
TKW5	D1 D2 D3 D4	1	30-40
CS1	D1 D2 D3 D4 Mandibule Maxillaire	1 à 3	80-100
CS2	D1 D2 D3 D4 Mandibule Maxillaire	1 à 3	80-100
CS3	D1 D2 D3 D4 Mandibule Maxillaire	1 à 3	80-100
CS4	D1 D2 D3 D4 Mandibule Maxillaire	1 à 3	80-100
CS5	D1 D2 D3 D4 Mandibule Maxillaire	1 à 3	80-100
CS6	D1 D2 D3 D4 Mandibule Maxillaire	1 à 3	80-100
LC1	D1 D2 D3 D4	1 à 3	60-80
LC190°	D1 D2 D3 D4	1 à 3	60-80
LC2	D1 D2 D3 D4	1 à 3	60-80
LC2L	D1 D2 D3 D4	1 à 3	60-80
LC2R	D1 D2 D3 D4	1 à 3	60-80
NINJA™	D1 D2 D3 D4	1 à 3	60-80
CE1	D1 D2 D3 D4	1 à 3	60-80
CE2	D1 D2 D3 D4	1 à 3	60-80
CE3	D1 D2 D3 D4	1 à 3	60-80

* Non applicable sur PIEZOTOME Solo (LED).